


MARCA	ARTESANO FCHINER
MODELO	UNA PIEZA LARINGE SILICONA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B según Directiva 93/42/CEE Anexo IX Punto 2 Regla 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

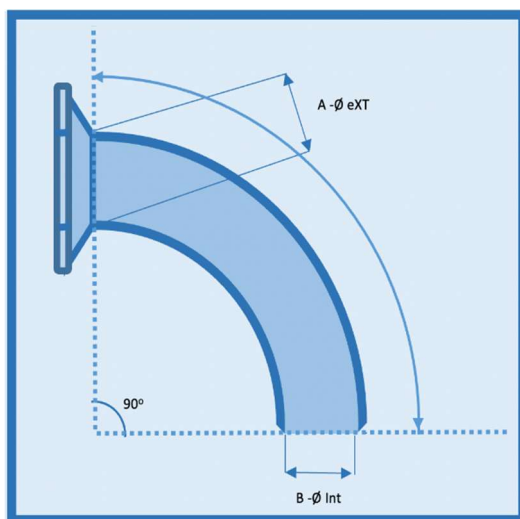









Las cánulas de *laringectomía silicona* están formadas por





Una única **Pieza exterior**: Formada por un tubo y placa inyectado de silicona de \varnothing exterior de (A)mm y longitud (L)mm. Luz del tubo o diámetro interior (B) mm.

La silicona de GRADO MÉDICO utilizada es de la siguiente composición: **REFERENCIA SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO.**

Presentación envase	ENVASE UNITARIO: Caja de cartón de 85x100x30 mm Contiene la cánula más instrucciones de uso.
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación siempre y cuando se conserve la integridad del envase y del producto.
Vida útil	Las cánulas fabricadas con silicona de grado médico están diseñadas para un uso a corto plazo, son productos para un único paciente y múltiples usos , por consiguiente, están previstos para utilizarse en un solo paciente. No está permitido reutilizarla en otros pacientes y, por consiguiente, reacondicionarla para su reutilización. La vida útil de la cánula al ser de uso a corto plazo tiene un máximo de validez de 29 días después de su primer uso.
Condiciones de almacenamiento y etiquetado.	El estuche con la cánula debe almacenarse en un lugar seco, protegido del polvo, la luz solar directa y/o el calor.

utili Simbologizada		Fabricante		No reutilizable		Caducidad		Lote		Referencia
		No estéril		Consultar Instrucciones de uso		No usar si el paquete está dañado		Presérvese de la humedad		Marcado CE Organismo notificado

Advertencia	Para su limpieza no deben usarse productos abrasivos ni derivados del petróleo. Debe evitarse el contacto con electrodos de electrocirugía y los haces de un bisturí laser.
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN	Las cánulas de SILICONA, no se presentan estériles . Para una mayor higiene las cánulas de silicona previo uso se pueden limpiar con agua templada y jabón neutro, enjuagar y secar. También se pueden hervir en agua potable a 100 grados centígrados durante 20 minutos. Esterilización: Pueden esterilizarse un máximo de 3 veces mediante la técnica de calor húmedo. Las cánulas se pueden envolver en un paño sin hilazas o colocarlas en un envoltorio para esterilización por vapor. Usar autoclave de desplazamiento por gravedad con los siguientes parámetros: Temperatura: 134 °C a 138°C. Tiempo: 5 minutos.
Información de conformidad	Cumple con la Directiva 93/42/CEE Cumple con el Real Decreto 192_2023 por el que se regulan los productos sanitarios. Producto certificado por IMQ S.p.A. como Organismo Notificado con el número: 0051
Eliminación	Embalaje: La cajetilla de cartón está hecha con materiales que pueden desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente y llevarse a un punto de reciclaje. Cánulas: La silicona es un producto catalogado como plástico a la hora de tirarlo, pero no está dentro de la categoría de envases, por lo que NO SE RECICLA . Se debe desechar en el contenedor gris, el de basuras normales.

Contacto	Francisco Chiner S.L. Calle Taronja 5A 46210 Picanya (Valencia) Tlf:963753858 Fax: 963748327 WhatsApp: 673162511 Mail: fchiner@fchiner.es
Foto del producto	<div data-bbox="778 212 1316 622" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1372 638 1476 761" style="text-align: right;">  0051 </div>

Tallas referencias medidas y UDI_DI	Financiadas por El Sistema Nacional de Salud (Cupón Precinto)
--	--

Talla	Ref.	A mm	B mm	L/LI mm	COD EAN	Código Nacional	Código EAN
Nº 4	T3041055	10	7	55	08436530074433		
Nº 4	T3041063	10	7	63	08436530073832		
Nº 5	T3051155	11	8	55	08436530074426		
Nº 5	T3051163	11	8	63	08436530074938	8470004953336	495333
Nº 6	T3061255	12	10	55	08436530074389	8470004953411	495341
Nº 6	T3061263	12	10	63	08436530074945		
Nº 7	T3071355	13	10	55	08436530074396	8470004953589	495358
Nº 7	T3071363	13	10	63	08436530074952		
Nº 8	T3081455	14	11	55	08436530074402	8470004953664	495366
Nº 8	T3081463	14	11	63	08436530074969		
Nº 9	T3091555	15	12	55	08436530074457	8470004953749	495374
Nº 9	T3091563	15	12	63	08436530074976		